

# CERTIFICATE



*presnosť  
merania*



# Alkohol tester



# CERTIFICATE


*Počkajte 20 minút  
po konzumácii alkoholu*



**1.** Stlačte oba konce trubičky tak, aby sa prepichla bezpečnostná fólia.




**2.** Hlboko sa nadýchnite a vydýchnite do trubičky v smere šípok 2-krát po 10s.

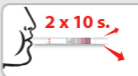

**3.** Po 2 - 4 minútach porovnajte farbu kryštálikov so škálou.



## podrobný návod zvnútra

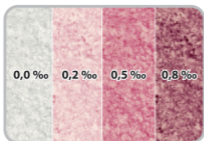

ŠKÁLA

**Distribútor:**

KALAS Medical, s.r.o.  
Slovenských partizánov 1130/50  
017 01 Považská Bystrica  
Slovakia  
Tel.číslo, fax: 042/4325 104  
Mobil: 0911 125 501  
e-mail: gardianova@kalas.sk  
[www.kalas.sk](http://www.kalas.sk)



DÁTUM SPOTREBY:

10.2023 r.



## Návod na použitie:

Táto jednorazová detekčná trubička na alkohol test, ktorá je určená na meranie množstva alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Najnižšia zistená hladina alkoholu pomocou tohoto testu je 0,2 ‰ (promile)\* alkoholu v krvi, čo sa rovná asi 0,1 mg/L alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Hladina alkoholu v krvi už na úrovni 0,2 ‰ môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť vedenia všetkých motorových vozidiel, čo predstavuje bezprostredné ohrozenie života, zdravia účastníkov cestnej premávky. Je treba pamätať, že hladina alkoholu stúpa behom hodiny po vypití alkoholu. Záleží tiež na pohlaví, fyzickej kondícii, rýchlosti pitia a druhu alkoholu, požití pevných jedál a od mnohých iných faktorov. Alkohol test sa skladá zo sklenenej trubičky, aktívnej látky v podobe absorpčných kryštálikov, filtrov, hliníkovej fólie a 2 ochranných zátk.

### Spôsob použitia:

1. Test môžete začať prevádzať po uplynutí najmenej 20 minút od posledného požitia alkoholu. Pred skúškou nikdy nefajčite.
2. Stlačte plastové ochranné zátky na oboch stranách alkohol testu až na doraz, aby ste prepichli ochrannú fóliu.
3. Hlboko sa nadýchnite a vydychujte vzduch do náustka, v smere šípok na alkohol teste. Vydychujte dvakrát po sebe počas 10 sekúnd a behom jednej fázy vydychovanie neprerušujte. Uistite sa, že vzduch prúdi z druhej strany alkohol testu. V opačnom prípade opakujte postup z bodu 2.
4. Po 2 až 4 minútach prečítajte výsledok testu. Pozor, po 5 minútach už bude výsledok nespoľahlivý.
5. Ak sa kryštáliky umiestené v strednej časti trubičky (biele pred začatím testu) zafarbia, osoba prevádzajúca alkohol test je pod vplyvom alkoholu a nesmie v žiadnom prípade viesť žiadne motorové vozidlo. Približné promile alkoholu v krvi zistíte tak, že farbu kryštálikov porovnáte s farebnou stupnicou, ktorá sa nachádza na alkohol teste a aj na obale. Zohľadnite, že kryštáliky menia svoju farbu s rôznou intenzitou. Môžu byť viditeľné biele miesta, hoci bola preukázaná prítomnosť alkoholu.
6. Po použití zahodte alkohol test do nádoby s komunálnym odpadom. Nevhadzujte do ohňa.

### Upozornenie:

Alkohol test môžete použiť len raz, otvorte ho iba bezprostredne pred použitím. Alkohol test chráňte pred slnkom, vysokými a nízkymi teplotami, skladujte na suchom a bezpečnom mieste, neprístupnom pre deti. Jednotlivé časti alkohol testu môžu byť životu a zdraviu nebezpečné. Pri nesprávnom používaní sa môže sklenená trubička zlomiť alebo rozbiť a spôsobiť rezné rany, u iných prvkov hrozí prehltnutie. Po zasiahnutí očí kryštálikmi vypláchnite oči prúdom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po zasiahnutí pokožky opláchnite miesto prúdom vody. Ak sa objaví začervenanie alebo alergická reakcia, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri prehltnutí kryštálikov vypite väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie a vyhľadajte lekársku pomoc.

Alkohol test zaisťuje dôveryhodný výsledok pod podmienkou správneho používania. Alkohol test je určený na súkromné použitie a nie je certifikovaným výrobkom na meranie množstva alkoholu. Zistené množstvo alkoholu nie je možné použiť pre dôkazné účely. V takom prípade pre presné meranie množstva alkoholu v krvi použite certifikovaný prístroj.

**Výrobca tohto alkohol testu nenesie právnu zodpovednosť za výsledok a spoľahlivosť vykonaného testu.**

\* Týka sa tiež alkohol testov stanovujúcich iné množstvo alkoholu vo vydychovanom vzduchu (pozri označenie na obale).

**V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte:**

KALAS Medical, s.r.o.

Slovenských partizánov 1130/50

017 01 Považská Bystrica

Slovakia

Tel.číslo, fax: 042/4325 104

Mobil: 0911 125 501

e-mail: gardianova@kalas.sk

**www.kalas.sk**